



BIOTECNA[®]
ESTHETIC TECHNOLOGY

CATÁLOGO 2019

Placas Termográficas



QUIÉNES SOMOS

Empresa fundada en el año 1990 dedicada a la formación y desarrollo de todo tipo de tratamientos médicos y estéticos, mediante la aplicación de corrientes Bioelectromagnéticas.

No es hasta el año 2000 cuando nace la empresa dedicada a la distribución de Aparatología Médico-Estética y al desarrollo de productos de Mesoterapia Virtual para obtener el máximo resultado en los tratamientos aplicados.

Experiencia de más de 15 años en el sector de la Estética, Medicina Estética, Fisioterapia y Rehabilitación.

Es en esta época cuando asume la distribución de diversas firmas prestigiosas, llegando en la actualidad a tener en su haber más de 400 centros, a los que dotamos de la formación teórica y práctica para que puedan mantener en todo momento la más alta cualificación profesional.

A partir del año 2014 comienza la fabricación de sus propios equipos (médico-estéticos y fisioterapéuticos) y, una línea de mesoterapia virtual, así como la distribución de dispositivos de diagnóstico de la celulitis.

Nuestro compromiso de una atención personalizada y un servicio postventa de alta calidad hace que el cliente tenga la tranquilidad absoluta de haber elegido los productos y la empresa adecuada, consiguiendo la satisfacción total por su parte.

QUÉ OFRECEMOS

FORMACIÓN

La formación adecuada es la piedra filosofal para que un centro funcione con una calidad y eficacia adecuadas, es por eso que a la entrega de los productos elegidos se imparte un curso de formación teórico-práctica, así como una jornada de puertas abiertas, para dar a conocer el nuevo servicio a sus clientes. También incluimos un calendario de cursos de reciclaje anuales para que pueda estar al día en todas las investigaciones y tratamientos actualizados.

ASESORAMIENTO

Contamos con un equipo de profesionales (médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos y monitoras de estética) capacitados para asesorar, orientar y en definitiva, ayudar a nuestros clientes para alcanzar el éxito en su empresa.

Con un horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas.

TECNOLOGÍA

Nuestros productos gozan de una eficacia contrastada a lo largo del tiempo y una calidad que cuida el más mínimo detalle para que los resultados en los distintos tratamientos sea el mayor posible, de otro lado cuenta con las certificaciones CEE, además de una fabricación 100% europea.

PLACAS TERMOGRÁFICAS

SISTEMAS DE DETECCIÓN PROFESIONAL DE LA CELULITIS

Termografía de contacto

¿Qué es? La termografía de contacto permite visualizar, con imágenes en color, la temperatura de las zonas bajo examen, utilizando placas especiales de Cristal Líquido Microencapsulado (E.L.C.).

Por lo tanto, es muy útil para evidenciar las alteraciones de temperatura cutánea causadas por la celulitis en sus distintos grados.

Las ventajas. La termografía de contacto permite:

- Identificar los primeros signos de la celulitis en la primera etapa (aunque no haya imperfecciones manifiestas) e, intervenir con tratamientos preventivos destinados a frenar el proceso.
- Cuantificar el grado de la celulitis, para ayudar al profesional a seleccionar el tipo de tratamiento más indicado en cada caso.
- Demostrar al usuario, con objetividad, la necesidad de someterse al tratamiento contra la celulitis. El test termográfico es fácil de efectuar, es inocuo, indoloro y reutilizable.
- Clasificar la etapa de la celulitis (Edematosa – Micronodular Macro-nodular), permitiendo al especialista intervenir con tratamientos específicos y personalizados.

Los sistemas termográficos no necesitan un mantenimiento particular o competencias para ser utilizados.


A quién está destinada. A todos los profesionales que llevan a cabo tratamientos contra la celulitis, y a las empresas que producen o comercializan sistemas de tratamiento contra la misma.

LAS LÍNEAS TERMOGRÁFICAS

Hemos estudiado múltiples soluciones termográficas, pensando en los distintos usuarios:



ANÁLISIS ADIPOSIDAD ABDOMINAL ADIPO-TEST

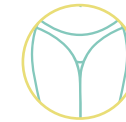

ANÁLISIS DE CELULITIS



EVO-6



CELLUTEST TABLET



ANÁLISIS DE CELULITIS Y ADIPOSIDAD ABDOMINAL ADICELL THERMO





ADIPO-TEST

NUEVO

Placas Termográficas


Permite identificar el nivel de endurecimiento de grasa en el abdomen y seleccionar los tratamientos más adecuados para cada nivel de adiposidad, localizando las áreas más problemáticas de tejido endurecido.

Accesorios


- Contenedor protector de placas con indicador de temperatura ambiente.
- Tres Placas para identificar el nivel de grasa abdominal.
- Tablet con sistema operativo Android y aplicación para almacenar resultados de pruebas termográficas e imágenes.
- Detergente para placas termográficas.
- Guía profesional para reconocer y tratar la grasa abdominal.
- Cartel con referencias para interpretar imágenes termográficas.




Clasificación Termográfica Abdominal de la grasa

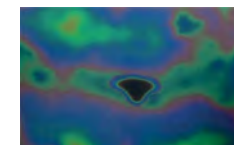

GRASA NORMAL

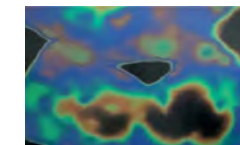

EXCESO DE GRASA

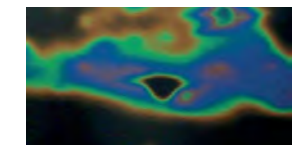

GRASA ENDURECIDA



EVO - 6

Placas Termográficas

Sistema profesional dotado de seis placas termográficas reutilizables de ALTA RESOLUCIÓN, para llevar a cabo análisis termográficos precisos en cualquier condición y en cualquier sujeto. Equipado con carrito para facilitar su traslado, cuenta con sistema fotográfico digital y software de archivo de imágenes y resultados del análisis termográfico, y está especialmente indicado para médicos estéticos, centros de belleza, Fitness y Spa.

Accesorios

- Carro.
- Estructura de aluminio.
- Contenedor porta-placas.
- Máquina fotográfica digital.
- ITS (para la elección de la placa correcta).
- Impresora térmica de sublimación de tinta.
- Thermocleaner (limpiador para placas termográficas).
- Póster para la interpretación de las imágenes termográficas.
- Manual de capacitación en el reconocimiento y tratamiento de la celulitis.
- 6 placas termográficas de alta resolución en 10 colores, que reaccionan a las siguientes temperaturas:
 - ◊ Placa RS 27: de 26,5 a 29,6°C.
 - ◊ Placa RS 28: de 27,5 a 30,6°C.
 - ◊ Placa RS 29: de 28,5 a 31,6°C.
 - ◊ Placa RS 30: de 29,5 a 32,6°C.
 - ◊ Placa RS 31: de 30,5 a 33,6°C.
 - ◊ Placa RS 32: de 31,5 a 34,6°C.

Clasificación termográfica de celulitis



AUSENCIA DE CELULITIS

Imagen uniforme.



CELULITIS FIBROSA

(Micronódulos).



CELULITIS EDEMATOSA

Imagen de manchas esfumadas.



CELULITIS ESCLERÓTICA

(Macronódulos) Imagen de manchas negras.



NUEVO



CELLUTEST TABLET

Placas Termográficas

NUEVO SISTEMA TERMOGRÁFICO PROFESIONAL para el análisis de la celulitis, equipado con Tablet Android, con una aplicación específica. De esta manera, será más fácil tomar una foto de la imagen termográfica y registrarla con los datos del cliente y los resultados de la prueba termográfica.

Accesorios

- Maletín protector de placas con termómetro de temperatura ambiente.
- 3 placas termográficas de alta resolución, reaccionando a las siguientes temperaturas:
 - ◇ RS 28: de 27.5 a 30.6 ° C.
 - ◇ RS 30: de 29.5 a 32.6 ° C.
 - ◇ RS 32: de 31.5 a 34.6 ° C.
- Tablet de 8 pulgadas (sistema operativo Android).
- Su sistema ITS para seleccionar la placa termográfica correcta.
- Thermocleaner - detergente para placas termográficas.
- Software para almacenar imágenes termográficas y resultados de pruebas.
- Guía profesional para reconocer y tratar la celulitis.
- Póster de interpretación y mostrar las ventajas de la termografía de contacto.

Clasificación termográfica de celulitis



AUSENCIA DE CELULITIS
Imagen uniforme.



CELULITIS FIBROSA
(Micronódulos).



CELULITIS EDEMATOSA
Imagen de manchas esfumadas..



CELULITIS ESCLERÓTICA
(Macronódulos) Imagen de manchas negras.



ADICEL THERMO

NUEVO

Placas Termográficas

Combina la detección temprana de la celulitis en las piernas y su clasificación, con la identificación de la adiposidad abdominal, permitiendo así conseguir los mejores resultados en cada tratamiento estético.

Accesorios


- Contenedor de madera (protector de placas).
- Cuatro placas termográficas universales de alta resolución (reutilizables), adecuadas para usar en piernas y abdomen.
- La placa 1 reacciona a bajas temperaturas y la placa 4 a las más altas, las placas 2 y 3 reaccionan en el medio.
- 1 ITS (Ideal Thermoplate Selector), sistema para elegir la placa adecuada para cada región del cuerpo.
- 1 Tablet con sistema operativo Android (8 pulgadas).
- 1 Thermocleaner (detergente para placas termográficas).
- Aplicación para tomar una foto de las imágenes termográficas y almacenar los resultados de las pruebas.
- 1 Professional Manual para reconocer y tratar la celulitis.
- 1 Professional Manual para reconocer y tratar la grasa abdominal.
- 1 póster para la interpretación de imágenes termográficas.




SISTEMA DE INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

Útil, simple e inmediato


Clasificación Termográfica Abdominal de la grasa

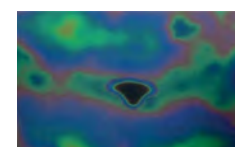

GRASA NORMAL

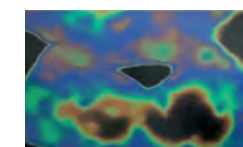

EXCESO DE GRASA

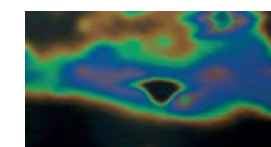

GRASA ENDURECIDA

Clasificación termográfica de celulitis



AUSENCIA DE CELULITIS

Imagen uniforme.



CELULITIS FIBROSA

(Micronódulos).



CELULITIS EDEMATOSA

Imagen de manchas esfumadas.



CELULITIS ESCLERÓTICA

(Macronódulos) Imagen de manchas negras.



biotecnaesthetic.es

958 784 732 // info@biotecna.es